



Clinical Procedure Card


Карта последовательности клинических процедур

Если K-File #010 с большим сопротивлением продвигается в канале – Small #021 .06
 Большинство корневых каналов – Primary #025 .08
 Если K-File #020 с лёгкостью достигает рабочей длины – Large #040 .08

- Предварительная рентгенограмма
- Препарирование полости доступа
- Выбор инструмента Wave One™

Процедура формирования корневого канала с одновременной ирригацией, пока инструмент не встретит сопротивление или не пройдёт на всю длину; очищайте инструмент и проводите ирригацию многократно; при необходимости повторите процедуру

Формирование на всю рабочую длину

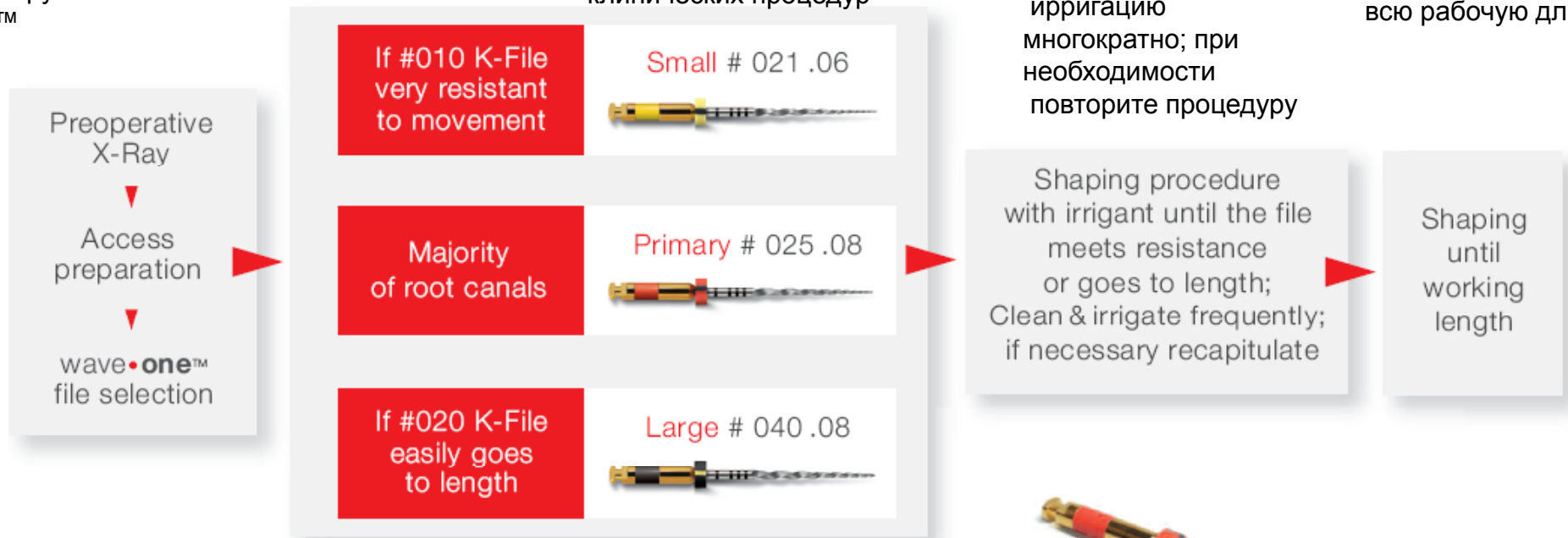

- The wave•one™ instruments must only be used in reciprocating motion with appropriate Dentsply Maillefer wave•one™ motors
- For more information please refer to the wave•one™ DFU

- Инструменты Wave One™ должны использоваться только в реципрокном движении с соответствующим мотором Wave One™ от компании Dentsply Maillefer
- Для дополнительной информации, пожалуйста, обратит к руководству по применению Wave One™





wave•one™ **small** reciprocating file

REF A 0700 2210 0 S01 - **3x** small (021.06) - 21mm + DFU

REF A 0700 2250 0 S01 - **3x** small (021.06) - 25mm + DFU

REF A 0700 2310 0 S01 - **3x** small (021.06) - 31mm + DFU



wave•one™ **primary** reciprocating file

REF A 0700 2210 0 P01 - **3x** primary (025.08) - 21mm + DFU

REF A 0700 2250 0 P01 - **3x** primary (025.08) - 25mm + DFU

REF A 0700 2310 0 P01 - **3x** primary (025.08) - 31mm + DFU



wave•one™ **large** reciprocating file

REF A 0700 2210 0 L01 - **3x** large (040.08) - 21mm + DFU

REF A 0700 2250 0 L01 - **3x** large (040.08) - 25mm + DFU

REF A 0700 2310 0 L01 - **3x** large (040.08) - 31mm + DFU



wave•one™ **assortment** reciprocating file

REF A 0700 2219 0A01 assorted - 21 mm

1x small (021.06) + **1x** primary (025.08) + **1x** large (040.08) + DFU

REF A 0700 2259 0A01 assorted - 25 mm

1x small (021.06) + **1x** primary (025.08) + **1x** large (040.08) + DFU

REF A 0700 2319 0A01 assorted - 31 mm

1x small (021.06) + **1x** primary (025.08) + **1x** large (040.08) + DFU